



800-236622



018006720/01
C.F. 0100001408

■ FLEAM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storic, 221
52015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Azienda con sistema di qualità certificato

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Distributore/Distributore:
Via Palermo, 26/A
43122 Parma (PR) Italy


Gli accessori posti all'interno del **Clenny® A Clean Box**, una volta disinfettati, si trovano all'interno di un ambiente antimicrobico.



Spostare quindi sul piano del lavabo o su superficie assorbente, rovesciare **Cleny® A Clean Box** e lasciar scolare l'acqua bollente, quindi estrarre gli accessori ed asciugarli senza strofinarli.




raffreddare le superfici esterne.
ATTENZIONE: Pericolo di ustione!

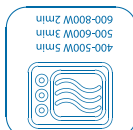

Introdurre Cleenly® A Clean Box nel forno a microonde e avviare il riscaldamento secondo i tempi indicati, in base alla potenza disponibile.



riempire clemmy - A clean box con 100 ml un
pareti). Per una migliore pulizia si consiglia
di utilizzare acqua demineralizzata. Inserir
quindi gli accessori e chiudere il coperchio.

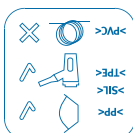

invernalizzazione a microonde e possibile installare qualsiasi accessorio della linea Clenny ad eccezione del tubo in PVC. È possibile inserire anche accessori di altre marche ma si consiglia di verificare nel manuale in dotazione quali accessori sono in PVC così da escluderli dalla disinfezione a microonde.

DISINFETTAZIONE IN FORNO A MICROONDE
ISTRUZIONI D'USO DA CONSERVARE

ISTRUZIONI D'USO DA CONSERVARE

Box per la disinfezione degli accessori per aerosolterapia

MADE IN ITALY




Clenny® A Clean Box è un dispositivo medico per la disinfezione degli accessori per aerosolterapia sia in microonde che a freddo.



Clenny® A Clean Box è composto da polipropilene miscelato con l'additivo antimicrobico **BioCote®** che rende le superfici protette 24h su 24h e conferisce permanentemente proprietà antibatteriche, antimicotiche e antivirali, che riducono la presenza di batteri fino al 99.99%.



DISINFEZIONE CON METODO CHIMICO

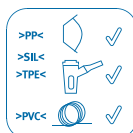ISTRUZIONI D'USO DA CONSERVARE

Nella disinfezione con metodo chimico è possibile inserire qualsiasi accessorio fornito in dotazione.



Inserire gli accessori nel **Clenny® A Clean Box**.
Preparare 1 litro di soluzione disinfettante
seguendo le istruzioni indicate dal produttore
del disinfettante stesso.



Versare la soluzione nel **Clenny® A Clean Box** fino a coprire gli accessori da disinfettare.



Lasciar agire il prodotto disinfettante come specificato nelle istruzioni del produttore.



Rovesciare **Clenny® A Clean Box** per lasciar scolare l'acqua, quindi estrarre gli accessori, sciacquarli (se e come indicato dal produttore del disinfettante) ed asciugarli senza strofinarli.

BUONE NORME DI UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Clenny® A Clean Box è un contenitore non sigillato per cui si consiglia di conservarlo in luoghi asciutti, puliti e lontani da fonti di calore per evitare di contaminare gli accessori ivi contenuti. Si consiglia di disinfettare gli accessori prima di utilizzarli nuovamente se questi vengono lasciati per diverso tempo all'interno del **Clenny® A Clean Box**.



8 025153 002451



Scopri i componenti
aggiuntivi e le altre
lingue sul sito.