

# Iper Clenny®

Decongestionante,  
fluidificante, favorisce  
il processo di riparazione  
della mucosa

## Iper Clenny spray

### Soluzione ipertonica 3% con acido ialuronico sale sodico

100 ml con getto continuo

#### Contenuto della confezione

Flacone da 100 ml, erogatore, foglietto illustrativo.

#### Indicazioni

**Iper Clenny spray** è una soluzione ipertonica con acido ialuronico ad azione decongestionante della mucosa nasale, indicata nel trattamento del raffreddore comune, riniti acute infettive ed allergiche e rinosinusiti. L'attività terapeutica è potenziata dall'azione mucoregolatrice dell'acido ialuronico che favorisce la clearance muco-ciliare e accelera il decorso di riniti e rinosinusiti, favorendo i processi di riparazione della mucosa nasale conseguenti all'evento acuto in adulti e bambini.

#### Composizione

Acqua depurata, sodio cloruro, acido ialuronico sale sodico di origine biotecnologica, benzalconio cloruro, azoto (gas propellente).

#### Modo d'uso

1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire l'apposito erogatore sulla valvola.
2. Adulti e bambini in grado di utilizzare autonomamente il prodotto: si consiglia di inclinare la testa da un lato e inserire l'erogatore nella narice rivolta verso l'alto, mantenendo la bombola in posizione verticale. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Se il lavaggio è stato effettuato in maniera corretta, si avvertirà il passaggio della soluzione nella parte alta del naso.
3. Bambini non in grado di utilizzare autonomamente il prodotto: distendere il bambino su un fianco. Mantenendo la bombola in posizione verticale, inserire l'erogatore nella narice superiore e premere dolcemente. Distendere il bambino sull'altro fianco e ripetere la procedura con l'altra narice.
4. Rimuovere le secrezioni con un fazzoletto o con aspiratore nasale Clenny A.
5. Dopo l'uso lavare l'erogatore con acqua calda ed asciugare.



Usare 3 volte al giorno per 2 secondi a narice.

#### Avvertenze

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno qualsiasi dei componenti.
- Non utilizzare se la confezione o il flacone appaiono danneggiati.
- Non ingerire; evitare il contatto con occhi e ferite; in caso di contatto accidentale risciacquare abbondantemente con acqua fredda.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Recipiente sotto pressione: proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso cui è destinato.
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.
- Il flacone è pressurizzato ed il suo contenuto è erogabile attraverso una valvola che non ne permette il riflusso.
- Non utilizzare in combinazione con disinfettanti topici a base di sali di ammonio quaternario.
- Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

#### Effetti indesiderati

L'utilizzo del dispositivo può causare rari eventi di natura lieve e transitoria nella normalità dei casi, come: irritazione, prurito o bruciore.

In casi eccezionalmente rari sono stati riferiti episodi di sanguinamento (epistassi), tinnito, otalgia, mal di testa, rinorrea, broncospasmo.

Interrompere immediatamente l'uso del prodotto al verificarsi di tali eventi o di qualsiasi evento non precedentemente elencato e, se i sintomi persistono, consultare il medico.

#### Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette; non esporre a luce solare diretta.

  
CONSUMER HEALTHCARE

  
Via Palermo 26/A - 43122 Parma - Italia  
Distribuito da: **Chiesi Italia S.p.A.**  
Via G. Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR) Italy

PRESERVA  
LA FASCIA D'OZONO



PAP 22, Raccolta carta - Verifica  
le disposizioni del tuo comune



Ultima revisione del foglietto illustrativo: Aprile 2023

0108012501/01 0426