

Clenny®A

Soluzione fisiologica sterile
25 flaconcini monodose da 2 ml

Per Aerosolterapia



INDICAZIONI

Clenny A è una soluzione fisiologica sterile, particolarmente indicata in aerosolterapia: quantità predefinita di soluzione fisiologica per la diluizione di farmaci da somministrarsi per nebulizzazione

ATTENZIONE

Attenersi alle istruzioni riportate dal produttore dell'aerosol e a quelle riportate sulle confezioni del farmaco da diluire.

AVVERTENZE

- Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato entro 48 ore;
- non iniettabile;
- per l'uso in aerosolterapia non usare nei pazienti affetti da gravi patologie respiratorie o cardiovascolari;
- non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
- non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
- conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
- non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

FREQUENZA D'USO

Secondo necessità e comunque più volte al giorno.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro E.Ph. 18,0 mg Acqua ppi 2,0 ml
Non contiene conservanti.

0108000712/01


MODALITÀ D'USO



1 Aprire il flaconcino **Clenny A** ruotando la parte superiore.



2 Premere il flaconcino **Clenny A** sui lati e far uscire la quantità di liquido necessaria.

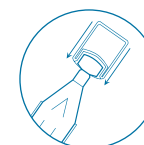

3 Richiudere il flaconcino **Clenny A** premendo la parte superiore sul beccuccio, come mostrato nell'immagine e utilizzarlo entro 48 ore.

Genetic S.p.A.
Contrada Canfora
I-84084 Fisciano (SA) Italy

Distribuito da:
Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo 26/A
43122 Parma (PR) Italy

Chiesi

CE
0373

Ultima revisione del foglietto illustrativo: GENNAIO 2015

0108000712/01