

Foglietto illustrativo IALU CLENNY GEL NASALE (come da riferimento formula 13161)

IALU CLENNY GEL NASALE 7.5 g

INDICAZIONE

Ialu Clenny gel nasale è un dispositivo medico in soluzione isotonica gelificata con acido ialuronico sale sodico.

È indicato nel caso di secchezza della mucosa nasale di varia origine; crea inoltre un'efficace barriera protettiva nei confronti degli agenti esterni riducendo l'eccessiva secrezione nasale. Consigliato in caso di riniti allergiche e non, facilità al sanguinamento nasale (epistassi) e nel periodo successivo ad interventi sul naso.

L'acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti e lubrificanti, consente di mantenere la mucosa nasale idratata, limitandone la iper-reattività e favorendo i processi di riparazione della mucosa nasale.

Indicato anche nei bambini e negli anziani.

COMPOSIZIONE

Acqua

Gomma xantana

Cloruro di sodio

Ialuronato di sodio (con range di peso molecolare 1.000-1.800 KDa alla concentrazione dello 0,3%)
Fenossietanolo

Acqua marina

DMDM idantoina

Metilparabene

Etilparabene

Tetrasodio edta

MODO D'USO

Aprire il tubo e inserire il beccuccio in una delle narici, orientandolo verso l'esterno della fossa nasale (cioè verso l'occhio omolaterale); applicare una dose di gel applicando una leggera pressione sul tubo; massaggiare leggermente dall'esterno la narice per distribuire uniformemente il gel; al termine dell'utilizzo pulire il beccuccio e chiudere il tubo.

Si consiglia di far precedere la somministrazione/applicazione di Ialu Clenny gel nasale da una adeguata pulizia del naso, che può essere rappresentata semplicemente da un delicato soffiarsi del naso o, dietro suggerimento del medico, anche da una pulizia più approfondita eseguita con un'irrigazione di soluzione salina.

V.1.0_2015_01

Si consigliano 3 – 4 somministrazioni al giorno e/o secondo necessità.

AVVERTENZE

- Leggere attentamente le modalità d'uso e le avvertenze prima dell'utilizzo.
- Il dispositivo è da considerarsi ad utilizzo individuale;
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti;
- Sospendere l'uso e consultare il medico in caso di insorgenza di effetti avversi;
- Non ingerire;
- Evitare il contatto con occhi; in caso di contatto accidentale risciacquare con acqua corrente fredda;
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
- Non utilizzare se l'imballaggio interno è aperto o danneggiato;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini;
- Ialu Clenny gel nasale è un trattamento aggiuntivo e non sostituisce altri trattamenti prescritti dal proprio medico.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette; non esporre a luce solare diretta

CONFEZIONE

Gel nasale in tubo da 7,5 g.



Apharm s.r.l. – Via Roma, 26 – 28041 Arona – Italy
www.apharm.it

Distributore (oppure **DISTRIBUTOR**) : Chiesi Farmaceutici S.p.A. – Via Palermo 26/A – 43122 Parma – Italy

